

PĚNA VE SPREJI K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ - ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCI


Incidin™ Foam

Pěna ve spreji na bázi glukoprotaminu k okamžitému čištění a k dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků a ostatních zdravotnických povrchů

Pěna pro čištění a dezinfekci kombinuje extrémně krátké časy působení s vlastnostmi jemného čistícího prostředku. Pěnová aplikace zvyšuje účinnost produktu.

Incidin Foam navíc nabízí:

- Široké spektrum účinnosti
- Snadnou aplikaci formou nestékající pěny
- Příjemnou vůni
- Testováním doloženou kompatibilitu se systémem utěrek Incidin Dry Wipes

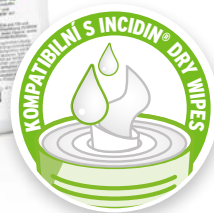

Incidin™ Foam

Rychle působící dezinfekční pěna na bázi glukoprotaminu, s nízkým obsahem alkoholu ve spreji pro okamžité použití k dezinfekci zdravotnických prostředků a všech typů povrchů včetně citlivých materiálů a přístrojů

Proč používat Incidin Foam?

ŠIROKOSPEKTRÁLNÍ ÚČINNOST

Incidin Foam je účinný proti bakteriím (včetně TBC), kvasinkám a různým virům, vhodný pro širokou škálu povrchů včetně vysoce rizikových míst.

Podrobnosti o časech působení na široké spektrum patogenů najdete v níže uvedené tabulce.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE V JEDINÉM KROKU

Incidin Foam zajišťuje čištění a dezinfekci v jediném kroku, uživateli, ale nabízí mnoho dalších výhod.

SPOLEHLIVÉ POUŽITÍ

Incidin Foam je připraven k okamžité aplikaci. Velmi snadno se používá. Kvalitní pěnový aplikátor vylučuje tvorbu kapiček.

Materiálová kompatibilita přípravku Incidin Foam byla ověřena rozsáhlým testováním a je možno jej proto bez nebezpečí poškození použít na dezinfekci většiny citlivých povrchů a přístrojů, jako jsou UZ sondy, klávesnice, displeje přístrojů, apod.



Incidin Foam 750 ml
láhev s pěnovým
aplikátorem



Incidin Foam
5 l kanistr

VÝSLEDKY MIKROBIOLOGICKÝCH A VIROLOGICKÝCH TESTŮ

ÚČINNOST NEŘEDĚNÉHO PROSTŘEDKU	DOBA PŮSOBNÍ
Dezinfekce povrchů dle VAH s a bez mechanického účinku (baktericidní, fungicidní - účinnost proti kvasinkám) (čistě i nečisté podmínky)	5 min
Dezinfekce povrchů dle VAH bez mechanického účinku (tuberkulocidní) (čistě i nečisté podmínky)	5 min
Rychlá dezinfekce dle metodiky DGHM 2001 bez mechanického účinku (baktericidní, fungicidní - účinnost proti kvasinkám) (čistě i nečisté podmínky)	1 min
EN 13727 baktericidní (čistě i nečisté podmínky)	30 sec
EN 13624 fungicidní - účinnost proti kvasinkám (čistě i nečisté podmínky)	30 sec
EN 14348 tuberkulocidní (čistě i nečisté podmínky)	3 min
Účinný proti obaleným virům dle doporučení RKI 1/2004 (vč. HIV, HBV, HCV)*	30 sec
Papova*	15 min
Rota*	5 min

* DVV 2008

CE 0297

ECOLAB HYGIENE S.R.O.
Hlinky 118
603 00 Brno
Česká republika
tel.: +420 543 518 247
www.ecolab.com

ECOLAB HEADQUARTERS:
ECOLAB EUROPE GMBH
Richtistrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland
+41 (0) 44 877 2001
www.ecolab.com

ECOLAB
DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany
+41 (0) 2173 599 0
www.de.ecolab.eu

RYCHLÝ ÚČINNÝ JEDNODUCHÝ

OBLAST POUŽITÍ

Přípravek k okamžité pěnové dezinfekci a čištění povrchů zdravotnických prostředků jako jsou např. lékařské přístroje, pomůcky a další předměty ve zdravotnictví.

NÁVOD K POUŽITÍ

Incidin Foam je určen k přímému použití. Neředí se! Přípravek rovnoměrně naneste na plochu nebo povrch postříkem ze vzdálenosti asi 30 cm (vydatnost max. 40 ml/m²) a nechte působit předepsanou dobu. Následně setřete do sucha čistou jednorázovou netkanou textilií, kterou důkladně setřete plochu nebo povrch a ponechte působit do zaschnutí.

SLOŽENÍ

Obsah účinných látek ve 100 g přípravku: 20 g 2-propanolu, 10 g ethanolu, 0,2 g benzalkoniumchloridu a 0,01 g glukoprotaminu

BALENÍ A OBJEDNÁVÁNÍ

PRODUKT	POČET KS V KARTONU	OBJEDNACÍ KÓD
Incidin Foam láhev	16 x 750 ml	3021800
Incidin Foam kanistr	2 x 5 L	3013440

SKLADOVÁNÍ

Výrobek skladujte v původním obalu na chladném a suchém místě při teplotách do 25 °C, mimo přímé sluneční světlo. Podrobné informace pro bezpečné nakládání s přípravkem viz. bezpečnostní list.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



Signální slovo: Varování

H226 Hořlavá kapalina a páry, H319 Způsobuje vážné podráždění očí, H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

2017 / 002 APPR. 2017.11.10.

ECOLAB®

To, whom it concerns:

Statement/ Prohlášení:

As a manufacturer of the medical device we hereby declare the additional claims, not mentioned on the label (in accordance with Council Directive MDD 93/42, Annex I and Guidance company Ecolab on usage of Legal and Marketing Claims). /

Jako výrobce zdravotnického prostředku souhlasíme s použitím dodatečných deklarací, neuvedených na etiketě (v souladu se směrnicí Rady MDD 93/42, příloha I a směrnicí firmy Ecolab pro používání právních a marketingových deklarací).

Manufacturer of the medical device below: / Výrobce produktu, uvedeného níže:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
ECOLAB-ALLEE, 140789 MONHEIM, GERMANY

Name of the product/Název produktu: **INCIDIN FOAM**

Confirms the correct use of the following declarations, which have not been a part of the current label:/potvrzuje správnost následujících deklarací, doposud neuvedených na etiketě výrobku:

Risk class:/Třída nebezpečnosti: **II.a**

Efficacy against:/Účinnost proti	Test methods/ Testovací metody	Conditions/Biologická zátěž	Exposure time/čas expozice
Bacteria/bakteriím	EN 16615	dirty/vyšší	1 min
Yeasts/ kvasinkám	EN16615	dirty/vyšší	1 min
Bacteria/bakteriím	EN 13697	dirty/vyšší	1 min
Yeasts/ kvasinkám	EN 13697	dirty/vyšší	5 min

Date/Datum : Nov. 23rd 2017

Signatures and stamps of the manufacturer /razítko a podpis výrobce:

i.A.



Sebastian Niebur

Ecolab Deutschland GmbH
Postfach 100262
40766 Monheim am Rhein

i.V.



Dr. Bernhard Meyer