

VYSOKÁ ÚČINNOST PŘI MIMOŘÁDNĚ NÍZKÝCH KONCENTRACÍCH

Incidin™ Rapid

Koncentrát na bázi KAS a glutaraldehydu

Přípravek působí proti širokému spektru mikroorganismů a představuje účinnou ochranou proti bakteriím, kvasinkám, plísním, virům a spórám bakterie *Clostridium difficile*. Jde o spolehlivé řešení bezpečnosti v případě výskytu epidemií a na rizikových odděleních. Produkt se současně vyznačuje vynikající materiálovou snášenlivostí na všech typech povrchů.

Incidin Rapid navíc nabízí:

- ▲ Čištění a dezinfekci v jediném kroku
- ▲ Vynikající materiálovou kompatibilitu včetně osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací masky
- ▲ Krátké doby působení
- ▲ Kompatibilitu se systémem utěrek Incidin Dry Wipes



Incidin™ Rapid

Koncentrát na bázi KAS a glutaraldehydu

Proč používat Incidin Rapid?

KRÁTKÉ DOBY PŮSOBNÍ PŘI NÍZKÝCH KONCENTRACÍCH

Incidin Rapid je speciálně vyvinutý tak, aby spojoval vysoký dezinfekční výkon s krátkými dobami působení a vynikajícím čistícím účinkem i při nízkých koncentracích.

ŠIROKÉ SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Přípravek je účinný proti bakteriím, kvasinkám, virům a spórám bakterie *Clostridium difficile*. Incidin Rapid je vhodné řešení pro vysoce rizikové oblasti a širokou škálu povrchů.

Navíc se přípravek pro jeho účinnost proti Norovirům a proti *Clostridium difficile* stává ideálním řešením v situaci výskytu epidemie.

VYNIKAJÍCÍ MATERIÁLOVÁ KOMPATIBILITA

Incidin Rapid se vyznačuje vynikající materiálovou kompatibilitou, lze jej spolehlivě používat na nejrůznějších typech povrchů a ploch.

ÚČINNOST		KONCENTRACE		DOBA PŮSOBNÍ
		%	ml/L	
Dezinfekce ploch dle VAH s mechanickým působením	Čisté i nečisté podmínky	0,25	2,5	1 h
		0,5	5	30 min
	Čisté podmínky	0,75	7,5	5 min
	Nečisté podmínky	1,0	10	5 min
Účinný proti obaleným virům (vč. HBV, HCV, HIV) dle doporučení RKI 1/2004*		0,25	2,5	5 min
Virucidní dle doporučení RKI 01/2004*		0,75	7,5	30 min
Adeno*		0,25	2,5	5 min
Papova*		0,25	2,5	30 min
Rota*		0,25	2,5	15 min
EN 14476 (virucidní)		0,5	5	30 min
		0,75	7,5	15 min
		1,5	15	5 min
- Noro (MNV)		0,5	5	5 min
- Adeno (čisté podmínky)		0,5	5	5 min
Sporicidní (<i>Clostridium difficile</i>)		2	20	1 h
Dezinfekce ochranných dýchacích masek a příslušenství v ponorné lázni (nečisté podmínky)		1,5	15	15 min

* DVV 2008

SILNÝ EFEKTIVNÍ VÝKONNÝ

OBLAST POUŽITÍ

Incidin Rapid je tekutý koncentrovaný dezinfekční a čistící přípravek, který je vhodný pro péči o plochy a povrchy ve zdravotnictví, včetně rizikových oddělení.

NÁVOD K POUŽITÍ

Připravte pracovní roztok o požadované koncentraci ředěním koncentráту ve studené vodě (max. 30°C). Pracovní roztok naneste na plochy a povrchy vhodným aplikačním postupem a ponechte jej působit předepsanou expoziční dobu nebo do zaschnutí. Dbejte na rovnoměrné a dostatečné nanesení. Vhodný pro dezinfekci ochranných dýchacích masek a příslušenství v ponorné lázni. Před použitím čtěte přiložené pokyny.

SLOŽENÍ

Obsah účinných látek ve 100 g přípravku: 9,8 g glutaraldehyd, 5 g alkyldimethylbenzylamonium-chlorid, 5 g diacyldimethylamonium-chlorid

BALENÍ A OBJEDNÁVÁNÍ

PRODUKT	POČET KS V KARTONU	OBJEDNACÍ KÓD
Incidin Rapid láhev 2 l	3	3041980
Incidin Rapid kanystr 6 l	1	3042000

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:



Signální slovo: Nebezpečí
 H226 Hořlavá kapalina a páry.
 H302 Zdraví škodlivý při požití.
 H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
 H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
 H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

POUŽÍVEJTE BIOCIDNÍ PŘÍPRAVEK BEZPEČNĚ.

ECOLAB s.r.o.
 Votčářova 2449/5, Libeň
 180 00 Praha 8
 Česká republika
 tel.: +420 602 156 877
 www.ecolab.com

ECOLAB HEADQUARTERS:
ECOLAB EUROPE GMBH
 Richtstrasse 7
 8304 Wallisellen Switzerland
 +41 (0) 44 877 2001
 www.ecolab.com

2017 / 031 APPR. 2018.08.06.

ECOLAB®

To whom, it concerns:

Statement:

As manufacturer of biocidal product we hereby declare additional claims not mentioned on the label (in accordance with Guidance company Ecolab on usage of Legal and Marketing Claims). / Jako výrobce biocidního prostředku souhlasí s použitím dodatečných deklarací, neuvedených na etiketě (v souladu se směrnicí firmy Ecolab pro používání právních a marketingových deklarací).

Manufacturer of the biocidal product below: / Výrobce biocidního produktu, uvedeného níže:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
ECOLAB-ALLEE, 140789 MONHEIM, GERMANY

confirms the correctness of the use for following declarations, not being part of current label, with are in accordance with local notification:/souhlasí s použitím následujících deklarací, doposud neuvedených na etiketě výrobku, které jsou v souladu s lokální notifikací

Name of the product/Název produktu: **INCIDIN RAPID**

Typ of biocidal product/Typ biocidního produktu: **PT2**

Efficacy against:	Test methods/ testovací metoda	conditions/ biologická zátěž	Concentration / koncentrace	Exposure time/ čas expozice
Bacteria, yeasts	EN 16615	clean/nižší	0,25% 0,5%	30 min 5 min
Bacteria, yeasts	EN 16615	dirty/vyšší	0,25% 0,75%	60 min 5 min

Date/Datum : Nov. 23rd 2017

Signatures and stamps of the manufacturer /razítko a podpis výrobce:

i.A.



Sebastian Niebur

Ecolab Deutschland GmbH
Postfach 10 02 62
40766 Monheim am Rhein

i.V.



Dr. Bernhard Meyer