

ÚČINNÉ ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE V JEDINÉM KROKU

Incidin™ Extra N

Koncentrát na bázi glukoprotaminu a KAS

ÚČINNÝ PROTI
NOROVIRŮM!

Receptura, která kombinuje unikátní aktivní složky, kterými jsou glukoprotamin a kvartérní amoniová sloučenina (KAS), poskytuje tomuto produktu vysokou efektivitu.

Incidin Extra N nabízí vynikající čisticí vlastnosti, které působí proti širokému spektru patogenů, proto je vhodný pro péči o povrchy zdravotnických prostředků a ostatní zdravotnické povrchy, a to i na odděleních s vyšším infekčním rizikem.

Incidin Extra N navíc nabízí:

- ▲ Vynikající materiálovou kompatibilitu
- ▲ Čištění a dezinfekci v jediném kroku
- ▲ Testováním prověřenou kompatibilitu se systémem utěrek Incidin Dry Wipes



Incidin™ Extra N

Koncentrát na bázi glukoprotaminu a KAS

Proč používat Incidin Extra N?

ŠIROKÉ SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Incidin Extra N je účinný proti široké škále patogenů včetně bakterií, kvasinek, obalených virů, Norovirů a Adenovirů. Tato vlastnost umožňuje jeho používání jak při běžném úklidu, tak i jeho nasazení v případě výskytu epidemiologicky závažné situace.

VYNIKAJÍCÍ MATERIÁLOVÁ KOMPATIBILITA

Incidin Extra N obsahuje nejen KAS, ale i unikátní aktivní složku firmy Ecolab, kterou je glukoprotamin. Tato receptura neobsahuje aldehydy. Jedná se o produkt, jenž vyniká vysokou materiálovou snášenlivostí.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE V JEDINÉM KROKU

Díky své široké antimikrobiální účinnosti kombinované s vysokým čistícím výkonem poskytuje Incidin Extra N záruku vysokého čistícího a dezinfekčního účinku v jednom jediném kroku, a to i ve vysoce rizikových oblastech, čímž šetří drahocenný čas.



Incidin Extra N
2 l láhev

Incidin Extra N
6 l kanystr

VÝSLEDKY MIKROBIOLOGICKÝCH A VIROLOGICKÝCH TESTŮ

ÚČINNOST	KONCENTRACE		DOBA PŮSOBNÍ
	%	g/L	
Dezinfekce povrchů dle VAH s mechanickým účinkem (baktericidní, fungicidní - mikroskopické kvasinkovité houby) (čistě a nečistě podmínky)	0,25	2,5	4 h
	0,5	5	1 h
	1	10	30 min
	2	20	15 min
Účinný proti obaleným virům (vč. HBV, HCV, HIV) dle doporučení RKI 1/2004 *	1	10	15 min
Rota*	0,25	2,5	5 min
Adeno*	2	20	1 h
	1	10	2 h
Papova*	1	10	1 h
Noro (MNV)*	1	10	4 h
	2	20	2 h

* DVV 2008

CE 0297

ECOLAB HYGIENE S.R.O.
Hlinky 118
603 00 Brno
Česká republika
tel.: +420 543 518 247
www.ecolab.com

ECOLAB HEADQUARTERS:
ECOLAB EUROPE GMBH
Richtstrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland
+41 (0) 44 877 2001
www.ecolab.com

ECOLAB
DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany
+41 (0) 2173 599 0
www.de.ecolab.eu

SPOLEHLIVÝ INOVATIVNÍ ÚČINNÝ

OBLAST POUŽITÍ

Incidin Extra N je tekutý koncentrovaný čistící a dezinfekční přípravek pro povrchy zdravotnických prostředků a ostatní zdravotnické povrchy.

NÁVOD K POUŽITÍ

Odměřené množství koncentráту vlijte do příslušného množství pitné vody (max. 30 °C) a tím zřeďte na požadovanou koncentraci. Celý povrch navlhčete dostatečným množstvím roztoku a nechte uschnout. Při přechodu na dezinfekční prostředek na aldehydové bázi je nutné důkladné odmytí prostředku.

Podrobné informace pro bezpečné nakládání s přípravkem viz bezpečnostní list.

SLOŽENÍ

100 g obsahuje následující účinné látky:
15,0 g benzalkoniumchloridu,
12,4 g glukoprotaminu.

BALENÍ A OBJEDNÁVÁNÍ

PRODUKT	POČET KS V KARTONU	OBJEDNACÍ KÓD
Incidin Extra N láhev 2 l	3	3054810
Incidin Extra N kanystr 6 l	1	3054860

SKLADOVÁNÍ

Výrobek skladujte v původním obalu na chladném a suchém místě při teplotách do 25 °C, mimo přímé sluneční světlo.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



Signální slovo: Nebezpečí
H302 + H332 Zdraví škodlivý při požití a při vdechování. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy

Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

2017 / 003 APPR. 2017.11.10

To whom, it concerns:

Statement/ Prohlášení:

As a manufacturer of the medical device we hereby declare the additional claims, not mentioned on the label (in accordance with Council Directive MDD 93/42, Annex I and Guidance company Ecolab on usage of Legal and Marketing Claims). /

Jako výrobce zdravotnického prostředku souhlasíme s použitím dodatečných deklarací, neuvedených na etiketě (v souladu se směrnicí Rady MDD 93/42, příloha I a směrnicí firmy Ecolab pro používání právních a marketingových deklarací).

Manufacturer of the medical device below: / Výrobce produktu, uvedeného níže:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
ECOLAB-ALLEE, 140789 MONHEIM, GERMANY

Confirms the correct use of the following declarations, which have not been a part of the current label:/potvrzuje správnost následujících deklarací, doposud neuvedených na etiketě výrobku:

Name of the product/Název produktu: **INCIDIN EXTRA N**

Risk class:/Třída nebezpečnosti: **II.a**

Efficacy against:/Účinnost proti	Test methods	Conditions/Biologická zátěž	Concentration /koncentrace	Exposure time/čas expozice
Bacteria/bakteriím	EN 16615	dirty/vyšší	0,5%	30 min
Yeasts/ kvasinkám	EN16615	dirty/vyšší	0,5%	30 min

Date/Datum : Nov. 23rd 2017

Signatures and stamps of the manufacturer /razítko a podpis výrobce:

i.A. 
Sebastian Niebur
Ecolab Deutschland GmbH
Postfach 10 02 62
40766 Monheim am Rhein

i.V. 
Dr. Bernhard Meyer