

ECOLAB®

Incidin™ Extra N



CZ Kapalný, koncentrovaný
přípravek pro dezinfekci
povrchů zdravotnických
prostředků.



Účinný proti bakteriím (vč. MRSA), mikroskopickým
kvasinkovitým houbám, obaleným virům
(vč. HBV, HCV a HIV), Adeno, Papova a Rota
virům dle doporučení RKI 01/2004.

Pokyny k použití: Připravte pracovní roztok o požadované
koncentraci ředěním přípravku ve studené vodě (max. 30°C).
Povrchy na vlhko setřete a ponechte působit po předepsanou
dobu nebo do zaschnutí. Dbejte na rovnoměrné a dostatečné
nanesení přípravku.

Obsah účinných látek ve 100g přípravku:

15.0 g alkyl(C12-C16)benzyltrimethylammonium-chloridy,
12.4 g reakční produkty glutamové kyseliny a N-alkyl(C12-C14)
propan-1,2-diaminu.

Pouze pro profesionální použití.

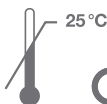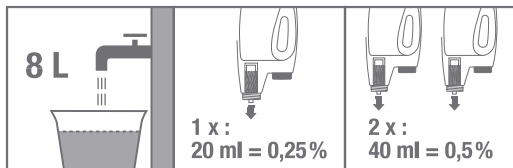

CE 0297

2 L

3054810



3054810F/21JAN19/D1