

**ECOLAB®**

Incidin® Extra N



CZ Kapalný, koncentrovaný přípravek pro dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků.

Účinný proti bakteriím (vč. MRSA), mikroskopickým kvasinkovitým houbám, obaleným virům (vč. HBV, HCV a HIV), Adeno, Papova a Rota virům dle doporučení RKI 01/2004. Certifikován VAH dle metodiky DGHM.

Pokyny k použití: Připravte pracovní roztok o požadované koncentraci ředěním přípravku ve studené vodě (max. 30°C). Povrchy na vlhko setřete a ponechte působit po předepsanou dobu nebo do zaschnutí. Dbejte na rovnoměrné a dostatečné nanesení přípravku.

Obsah účinných látek ve 100g přípravku:
15,0 g alkyl(C12-C16)benzyltrimethylamonium-chloridy,
12,4 g reakční produkty glutamové kyseliny a
N-alkyl(C12-C14)propan-1,2-diaminu.

Pouze pro profesionální použití.

	Conc.		
	%	ml/L	
Dezinfekce povrchů dle VAH s mechanickým účinkem (baktericidní, fungicidní - mikroskopické kvasinkovité houby) (čistě a nečistě podmínky)	0,25 0,5 1,0 2,0	2,5 5,0 10 20	4 h 1 h 30 min 15 min
Účinný proti obaleným virům (vč. HBV, HCV, HIV) dle doporučení RKI 1/2004 *	1,0	10	15 min
Rota*	0,25	2,5	5 min
Adeno*	2,0 1,0	20 10	1 h 2 h
Papova*	1,0	10	1 h
Noro (MNV)*	1,0 2,0	10 20	4 h 2 h

* DVV 2008

6 L

3054860 4 028163 054865



CE 0297



3054860F/IGMAR15/D1



3054860F-X.pdf

