

OPSITE™ FLEXIGRID™

Transparentní krytí

Popis

OPSITE FLEXIGRID je transparentní krycí fólie, která se skládá z polyuretanového filmu s akrylovým lepidlem. Fólie má podpůrnou pružnou mřížku pro snadnou aplikaci.

Způsob použití

Při použití na poranění vytvoří fólie OPSITE zadržením exudátu vlhké prostředí. Fólie propouští vlhké páry, což umožňuje odpařování zbytku exudátu a brání macerování pokožky. OPSITE FLEXIGRID je voděodolná fólie, která napomáhá prevenci bakteriální kontaminace rány. Fólie je značně flexibilní a snadno se přizpůsobí citlivým místům. Nosnou mřížku lze využít k mapování ran a sledování procesu hojení.


Indikace

OPSITE FLEXIGRID je indikována pro:

- Ošetření povrchových poranění (např. mírné popáleniny, povrchové rány, oděrky, ulcerace a vředy na končetinách v konečné fázi hojení).
- Ochranu pokožky proti tření a vnější kontaminaci. Jako prevence proti proleženinám.
- Přidržení primárních krytí, např. INTRASITE™ Gel, ALLEVYN™ Cavity, ALLEVYN Non-Adhesive.
- Fixaci katétrů.
- Zakrytí pooperačních ran, kožních štěpů a implantátů.

Bezpečnostní opatření

Pokud dojde k infikování rány, je třeba infekci léčit podle místních klinických postupů. Při odstranění krytí u puchýřů dbejte zvýšené opatrnosti, protože je horní vrstva pokožky na puchýři velmi choulolistivá. Pokud nebylo krytí aplikováno delší dobu, tato vrstva se může odtrhnout. Dbejte na to, aby nedošlo k poškození pokožky při opakovaných aplikacích u pacientů s tenkou či jemnou pokožkou. Jako u všech adhezních materiálů byly zaznamenány případy podráždění a/nebo macerace pokožky v okolí rány. Je třeba mít na paměti, že nevhodné používání nebo příliš časté výměny krytí, mohou způsobit odtržení pokožky, zejména u pacientů s jemnou pokožkou. Během běžného procesu hojení se z rány odstraňuje přebytečný materiál a rány se tak po prvních několika výměnách krytí bude zdát větší. Pokud se rána zvětšuje i po několika prvních výměnách, přerušete používání a poradte se s odborníkem. Pokud se objeví příznaky podráždění (zarudnutí, zanícení), mokvání (nadměrná hydratace pokožky), hypergranulace (nadměrná tkáň), nebo citlivosti (alergické reakce), přerušete používání a poradte se s odborníkem.

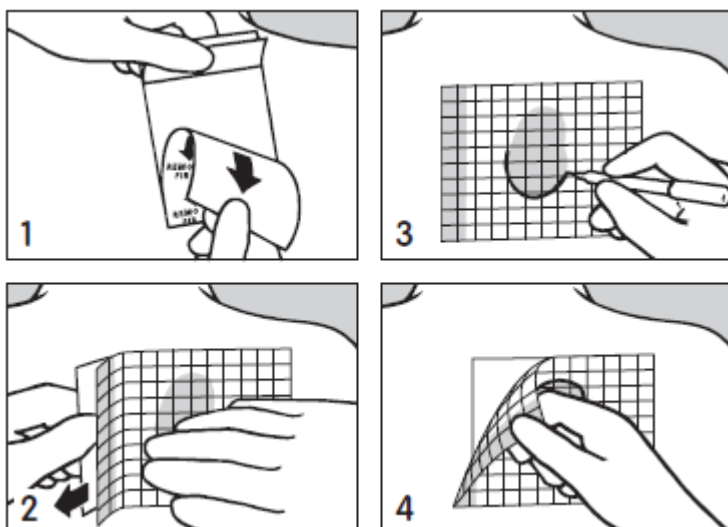

Návod k použití

1. Očistěte a vysušte místo aplikování.
2. Sejměte podkladový papír.
3. Aplikujte krytí, sejměte boční pásek a uhladte.
4. Je-li třeba, vyznačte před sejmutím ránu na zeleném čtverečkovaném nosiči.
5. Sejměte nosič.
6. Při snímání krytí zvedněte jeden růžek a jemně stáhněte z pokožky. Krytí může být aplikováno po dobu 14 dnů. Při manipulaci a likvidaci použitého krytí dbejte opatrnosti.

Dostupnost výrobku

Č.	Velikost	Balení
4628	6cm x 7cm / 23/8" x 23/4"	100
66004633	10cm x 8cm / 4" x 31/8"	100
4629	10cm x 12cm / 4" x 43/4"	10
4630	10cm x 12cm / 4" x 43/4"	50
4631	15cm x 20cm / 6" x 8"	10
4632	12cm x 25cm / 43/4" x 10"	20

Výrobce

Smith & Nephew Medical Ltd.
101 Hessle Road, Hull HU3 2BN England.
™Obchodní značky Smith & Nephew
©Smith & Nephew Datum vydání 07/2015
www.smith-nephew.com

09789



Sterilizováno ethylenoxidem



Nepoužívat opětovně



Čtěte návod k použití



Skladujte v suchu (méně než 25°C/77°F)



Pozor



Chránit před slunečním zářením



Nepoužívat, jestliže je balení poškozeno

