

KRYTÍ IODOSORB™

Krytí Cadexomer s jódem

STERILE R sterilizováno Gama zářením

Na jednorázové použití.

Nepoužívejte obsah, pokud je balení otevřeno, nebo poškozeno, nebo po datu expirace uvedeném na obalu.

Skladujte v suchu. (<25°C).

Popis

Krytí IODOSORB je sterilní tmavě hnědá krycí pasta s plynovou podpůrnou vrstvou na obou stranách krytí. Pasta se skládá z perliček cadexomeru (mikrokuličky modifikovaného škrobu), polyetylénglykolu a jódu. Mikrokuličky jsou biologicky rozložitelné. Krytí IODOSORB odstraňuje přebytečný exsudát a rozbředlý povlak z lůžka rány a redukuje bakterie na povrchu rány. Přitom se proměňuje na měkký vlhký gel.

Indikace

Krytí IODOSORB je indikováno na topickou léčbu chronických exsudujících ran.

IODOSORB lze používat s tlakovou terapií. Krytí IODOSORB lze použít na infekční rány. V případě použití výrobku u infikovaných ran, musí být infekce pod kontrolou a léčena dle příslušných klinických postupů.

Kontraindikace

IODOSORB by se neměl používat na suchou nekrotickou tkáň nebo u pacientů se známou přecitlivělostí na jód, nebo na jakoukoliv z dalších složek přípravku. Nepoužívejte krytí IODOSORB u dětí, těhotných, nebo kojících žen nebo u lidí s poruchou funkce ledvin nebo poruchou štítné žlázy (např. Hashimotova thyreoidita, nebo netoxická nodulární struma).

Varování

Existuje potenciální riziko interakce s lithiem, což by mělo za následek zvýšení pravděpodobnosti hypotyreózy. Nepoužívejte krytí IODOSORB současně s antiseptiky obsahující rtuť nebo taurolidin. V případě, že má pacient absolvovat vyšetření funkce štítné žlázy, měl by informovat lékaře.

Předběžná opatření

- Obsah sáčku by se měl použít pouze u jednoho pacienta.
- Nepoužívejte krytí IODOSORB v blízkosti očí, uší, nosu nebo úst.
- Výrobek je pouze pro vnější použití.
- Krytí IODOSORB může způsobit mírnou, přechodnou bolest zejména první hodinu po aplikaci. Je to známkou toho, že výrobek začíná čistit ránu. Příležitostně může krytí IODOSORB způsobit zarudnutí nebo otok kůže kolem okrajů rány, což obvykle přejde. Pokud ale tyto symptomy přetrvávají, nebo pokud pacient pociťuje jiné příznaky, měl by se obrátit na lékaře, nebo zdravotní sestru.
- Kontakt s kůží kolem rány/intaktní kůží by měl být minimalizován.
- V případě, že se krytí IODOSORB nechá vyschnout, může dojít k tvorbě přilnavého strupu.
- Jednorázová aplikace krytí IODOSORB by neměla přesáhnout obsah 50 g (ekvivalent balení 5 sáčků po 10 g) a týdenní aplikace by neměla být vyšší než 150 g (ekvivalent balení 15 sáčků po 10 g).
- Délka celkové léčby by neměla přesáhnout 3 měsíce.

Návod na použití

Použití krytí IODOSORB

1. Před a po použití si umyjte řádně ruce. Používejte rukavice, vyčistěte ránu a její okolí buď jemným proudem vody, nebo fyziologického roztoku. **NEVYSUŠUJTE** povrch rány.
2. Odstraňte krycí gázu na obou stranách pasty.
3. Ustříhněte nebo vytvarujte do tvaru rány. Přikryjte celou ránu vhodným sekundárním krytím. Aplikujte kompresní obvazy, pokud je to žádoucí. Zbývající krytí by mělo být zlikvidováno z důvodu ztráty sterility.

Výměna krytí IODOSORB

1. Krytí IODOSORB by se mělo vyměnit, jakmile je krytí nasyceno tekutinou z rány a všechny jód se uvolnil. Vhodný okamžik k výměně je indikován ztrátou barvy krytí, obvyklá výměna je 2-3 krát do týdne. Pokud rána silně teče, může být nutná denní výměna krytí.
2. Pokud je potřeba, lze namočit krytí na pár minut a pak teprve odstranit krytí z rány.
3. Jemně odstraňte krytí IODOSORB, použijte proud vody nebo fyziologický roztok.
4. Jemně osušte veškerou přebytečnou tekutinu, před opětovnou aplikací krytí IODOSORB ponechte povrch rány mírně vlhký.

Balení

Kód

66001290	5 x 5g
66001291	3 x 10 g
66001292	5 x 10 g
66001293	2 x 17 g

Výrobce:

Vyrobeno ve Švédsku pro
Smith & Nephew Medical Limited,
Hull HU3 2BN, Anglie
™ Obchodní značka Smith & Nephew
©Smith & Nephew

Datum vystavení 09/2011
www.smith-nephew.com
www.iodosorb.com

0350203 30826

