

ALLEVYN™ Non-Adhesive



NEADHEZNÍ NÁPLAST

STŘEDNÍ
ABSORPCE

POUŽITELNOST
DO 7 DNŮ



ALLEVYN™

Classic

ALLEVYN™ neadhezní hydrocelulózní pěnová náplast



Sterilizováno gama zářením. Nepoužívejte opakovaně. Nepoužívejte obsah, je-li obal otevřený nebo poškozený. Skladujte v suchu (<25°C/77°F). Chraňte před světlem.

Popis

ALLEVYN Non-Adhesive má pokročilé složení s trojitou vrstvou, která kombinuje absorpční hydrocelulózní vložku mezi perforovanou nepřilnavou kontaktní vrstvou na rány a velmi prodyšnou vnější voděodolnou fólií, která napomáhá prevenci bakteriální kontaminace rány.

Způsob použití

Pokročilé složení ALLEVYN Non-Adhesive s trojitou vrstvou usnadňuje dynamickou kontrolu tekutin a zajišťuje optimální okolí rány, které podporuje hojení a pomáhá minimalizovat riziko macerace. Podpurná fólie napomáhá prevenci průniku tekutin a bakterií. Náplast lze snadno aplikovat i odstranit. Díky tomu, že neobsahuje lepidlo, je náplast vhodná především pro jemnou pokožku.

Indikace

Ošetření poranění s druhotným zaměřením na chronické a akutní rány s exudáty, hluboká a středně hluboká i povrchová granulující poranění s exudáty, např. proleženiny, vředy na nohou, diabetické vředy na chodidlech, maligní rány, operační rány, popáleniny prvního a druhého stupně, místa implantátů a plísňové vředy. ALLEVYN Non-Adhesive lze použít na infikované rány. Při použití na infikovaných poraněních je třeba rány ošetřovat podle místního klinického protokolu. ALLEVYN Non-Adhesive lze použít pod tlakem. ALLEVYN Non-Adhesive lze použít ve spojení s INTRASITE™ GEL na nekrotické nebo olupující se rány. ALLEVYN Heel je vhodná jako náplast na paty a jiné citlivé oblasti a pro použití s prostředky uvolňujícími tlak.

Bezpečnostní opatření

- Nepoužívejte ALLEVYN Non-Adhesive spolu s oxidačními činidly, např. roztoky chlornanu (např. EUSOL) nebo peroxid vodíku, která mohou narušit absorpční polyuretanovou složku náplasti.
- Pokud dojde k zarudnutí nebo zcitlivění pokožky, přerušete používání náplasti a poraďte se s odborníkem. ALLEVYN Heel se nesmí používat k uvolnění tlaku nezávisle na prostředcích k uvolnění tlaku.
- ALLEVYN Non-Adhesive je určen k jednorázovému použití. Při použití u více pacientů může dojít ke křížové kontaminaci nebo infekci.

Otevřením obalu náplasti dojde k narušení sterilní ochrany, proto se nesmí nepoužité náplasti po otevření uchovávat pro pozdější použití.

Návod k použití

1. Ránu očistěte podle místního klinického protokolu.
2. Vyberte vhodnou velikost náplasti. ALLEVYN Non-Adhesive lze upravit zastřížením, aby odpovídal i méně vhodným oblastem. Při stříhání náplasti vždy dodržujte hygienický postup. Při kompresní léčbě je třeba náplast zastříhnout na velikost rány.
3. Připravte a očistěte okolní pokožku, samotnou ránu a odstraňte nadměrnou vlhkost. Veškeré přebytečné ochlupení je třeba odstranit, aby náplast co nejvíce přilnula k ráně.
4. Vyjměte náplast ALLEVYN Non-Adhesive z obalu hygienickým postupem.
5. Aplikujte bílou stranou na ránu, aby s ní byla v kontaktu, a zajistěte náplast retenční fólií (např. OPSITE™ Flexifix nebo OPSITE Flexifix Gentle), lepicí páskou nebo obvazem.
6. Pokud je náplast přestřižena, zajistěte, aby byly odhalené pěnové části zakryté vhodnou fólií, aniž by však došlo k překrytí celé náplasti.

Četnost výměny

V počátečních stádiích ošetření rány je třeba náplast ALLEVYN Non-Adhesive kontrolovat podle místního klinického protokolu. Používá-li se náplast na infikovaných poraněních, je třeba infekci kontrolovat a léčit podle místního klinického protokolu. Aplikovanou náplast lze ponechat až 7 dnů, popř. dokud viditelný exudát nedosahuje 1,5 cm od okraje náplasti, cokoli nastane dříve. V oblasti kříže lze náplast ponechat po dobu až 5 dnů, v důsledku zvýšené možnosti kontaminace a infekce v této oblasti se však vyžaduje zvýšené sledování adhezních vlastností podle místních klinického protokolu. Rozhodnutí o výměně závisí na klinickém vyhodnocení, kdy je třeba rovněž přihlédnout k místnímu klinickému protokolu.

Odstranění náplasti

Při odstranění náplasti ALLEVYN Non-Adhesive sejměte retenční náplast nebo obvaz a odstraňte náplast z rány.

Stupnice na obalu slouží pouze jako vodítko pro výběr náplasti a je třeba dbát na to, aby nedošlo ke křížové kontaminaci.

Dostupnost výrobku

Č.	Velikost	Dostupnost	Země původu
66007643	5cm x 5cm / 2" x 2".	Krabice po 10	UK
66007637	10cm x 10cm / 4" x 4"	Krabice po 10	UK
66007335	10cm x 20cm / 4" x 8"	Krabice po 10	UK
66000093	15cm x 15cm / 6" x 6"	Krabice po 10	UK
66007638	20cm x 20cm / 8" x 8"	Krabice po 10	UK
66000663	40cm x 70cm / 15 ³ / ₄ " x 27 ¹ / ₂ "	Krabice po 2	UK
66000630	Patní	Krabice po 5	Čína
66000773	Patní	Krabice po 10	Čína

Výrobce

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN England.

™Obchodní značky Smith & Nephew ©Smith & Nephew Datum vydání 01/2014

