



ALLEVYN Ag Adhesive - přilnavé antimikrobiální hydrocelulární pěnové krytí

Na středně až silně exsudující (infikované) rány. Obvaz obsahuje ionty sulfadiazin stříbra.

Popis

ALLEVYN Ag Adhesive je absorpční antimikrobiální krytí, které tvoří tři vrstvy: Absorpční hydrocelulární jádro z pěnové hmoty, jež obsahuje sulfadiazin stříbra (SSD) a nachází se mezi perforovanou přilnavou vrstvou přicházející do kontaktu s ránou a vodotěsnou vnější fólií. Obvaz vytváří účinnou bariéru proti mikrobiální kontaminaci a chrání ránu proti invazivním patogenním mikroorganismům. To podporuje rychlejší hojení. SSD je účinné proti mikroorganismům, které se mohou vyskytovat v obvazu a v ráně. U exsudujících ran obvaz přispívá k udržení vlhkého prostředí rány.

Indikace

ALLEVYN Ag Adhesive je absorpční antimikrobiální krytí pro ošetření sekundárně se hojících, chronických i akutních, granulujících a exsudujících ran, jako jsou například: dekubitální vředy, venózní vředy, diabetické vředy, popáleniny I., II. a III. stupně s různou hloubkou od povrchových po hluboké, místa po odběru kožních štěpů, rány s bujením/maligní rány a chirurgicky otevřené rány.

ALLEVYN Ag Adhesive se může aplikovat u infikovaných ran. Při použití u infikovaných ran by rána měla být ošetřena podle příslušného léčebného protokolu platného v daném místě.

Kontraindikace

- Nepoužívejte u pacientů s přecitlivělostí na sulfadiazin stříbra nebo sulfonamidy.
- Je známo, že sulfonamidy způsobují jadrový ikterus. Proto by se ALLEVYN Ag Adhesive neměl používat u žen, které jsou těhotné, prodělaly předčasný porod anebo kojí. Nepoužívejte ani u předčasně narozených a novorozenců během prvních měsíců života.

Bezpečnostní opatření

- K zevnímu použití.
- ALLEVYN Ag Adhesive se nesmí používat současně s oxidujícími látkami (např. EUSOL) nebo peroxidem vodíku, protože ty mohou rozložit absorpční složku polyuretanu.
- ALLEVYN Ag Adhesive může být nekompatibilní s topickými antimikrobiálními látkami.
- V případě klinické infekce nenahradí topická aplikace stříbra nezbytnou systémovou terapii ani jinou adekvátní léčbu infekce.
- Jako u všech přilnavých produktů se může v jednotlivých případech vyskytnout podráždění nebo macerace okolní pokožky.
- Pozor: Při nesprávném použití nebo příliš časté výměně obvazů může speciálně u pacientů s citlivou kůží dojít k podráždění nebo maceraci okolní kůže.
- Při elektronickém vyšetření, např. EEG nebo EKG, se vyhněte kontaktu s elektrodami nebo vodivými gely.
- Pokud je ALLEVYN Ag Adhesive aplikován u pacientů během vyšetření MRT (terapie magnetickou rezonancí), může dojít k zahřátí.
- Nepoužívejte ALLEVYN Ag Adhesive společně s produkty na bázi olejů, jako je např. petrolatum nebo vazelína.
- U ran s kavitami nepoužívejte ALLEVYN Ag Adhesive samotný, lze ho však u těchto ran použít jako sekundární obvaz.

- Stejně jako u všech produktů obsahujících sulfadiazin stříbra byste měli dodržovat níže uvedená bezpečnostní opatření, zvláště tehdy, když obvaz kryje velké plochy.
- Pozor u pacientů se signifikantním omezením funkce jater nebo ledvin.
- Opatrně u pacientů s deficitem glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy.
- Účinky systémově podávaných léků se mohou měnit. To se může týkat zejména orálně podávaných hypoglykemik a fenytoinu. U těchto léků se doporučuje sledovat krevní hodnoty, protože jejich účinek může být zesílen.
- ALLEVYN Ag Adhesive je jednorázový produkt. Použití u více než jednoho pacienta může vést ke křížové kontaminaci nebo infekci. Navíc se zhoršují antimikrobiální vlastnosti produktu. Otevření balení s krytím poškodí sterilní bariéru, proto neschovávejte použité obvazy pro pozdější použití.

Pokyny pro použití

- V případě potřeby je třeba ránu očistit podle léčebného protokolu.
- Vyberte krytí, které je větší než rána.
- Připravte kůži okolo rány: odstraňte z ní přebytečnou vlhkost. Překážející ochlupení ostříhejte, aby se obvaz dostal do těsného kontaktu s ránou.
- ALLEVYN Ag Adhesive vyjměte z obalu aseptickým postupem.
- Napřed odstraňte z ALLEVYN Ag Adhesive ochranný materiál a obvaz zafixujte.
- ALLEVYN Ag Adhesive lze používat na rány na patách, loktech a dalších špatně přístupných místech: přistříhněte do potřebného tvaru.
- Při použití ALLEVYN Ag Sacrum umístěte krytí úzkým koncem minimálně 2 cm nad anus a potom obvaz hladce natáhněte přes sacrum.

Jak často měnit krytí

Na začátku léčby rány by se mělo krytí ALLEVYN Ag Adhesive průběžně kontrolovat. Při použití na infikovaných ranách by se měla infekce kontrolovat a ošetřovat podle léčebného protokolu platného v daném místě. Podle klinického obrazu rány a okolí rány můžete nechat krytí na místě až 7 dní, dokud nebude vidět výpotek a dokud nepronikne až do vzdálenosti 1,5 cm od okraje krytí (podle toho, co nastane dříve). Přitom je třeba přihlížet k léčebným protokolům platným v daném místě. Při použití krytí v sakrální oblasti může krytí zůstat na ráně až 5 dní. Vzhledem k vyššímu riziku kontaminace a infekce v této oblasti těla může být nezbytná zvýšená kontrola přilnutí krytí podle léčebného schématu platného v daném místě.

Odstranění krytí

K odstranění krytí ALLEVYN Ag Adhesive zdvihněte jeden roh a táhněte obvaz paralelně s pokožkou směrem dozadu. Sakrální krytí by se mělo odstraňovat od horního okraje dolů směrem k řitnímu otvoru, aby se minimalizovalo riziko infekce.

Stupnice na obalu slouží jen pro orientaci při výběru fixace. Pozor, aby nedošlo ke křížové kontaminaci.

Balení

Kód	Rozměr	Počet ks v balení
66800072	7,5 cm x 7,5 cm	10 kusů
66800074	10 cm x 10 cm	10 kusů
66800076	12,5 cm x 12,5 cm	10 kusů
66800080	17,5 cm x 17,5 cm	10 kusů
66800092	Sacrum 17cm x 17cm	10 kusů
66800095	Sacrum 22cm x 22cm	10 kusů

Výrobce: Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN England.

Obchodní značka Smith & Nephew ©Smith & Nephew datum vydání 08/2014

Vyrobena v Číně



Sterilizováno
paprsky gama



Nepoužívat,
když je obal už
otevřený nebo
poškozený



Jen
k jednorázovému
použití



Dodržujte
návod
k použití



Skladujte
v suchu
($<25^{\circ}\text{C}$)



Pozor!
Čtěte
návod
k použití



Nevystavujte
přímému slunci



10601174 45434