



ALLEVYN Ag Non-Adhesive - nepřilnavé antimikrobiální hydrocelulární pěnové krytí

Na středně až silně exsudující (infikované) rány. Krytí obsahuje ionty sulfadiazin stříbra.

Popis

ALLEVYN Ag Non-Adhesive je absorpční antimikrobiální krytí, které tvoří tři vrstvy: Absorpční hydrocelulární jádro z pěnové hmoty, jež obsahuje sulfadiazin stříbra (SSD) a nachází se mezi perforovanou nepřilnavou vrstvou přicházející do kontaktu s ránou a vodotěsnou vnější fólií. Krytí vytváří účinnou bariéru proti mikrobiální kontaminaci a chrání ránu proti invazivním patogenním mikroorganismům. To podporuje rychlejší hojení. SSD je účinné proti mikroorganismům, které se mohou vyskytovat v krytí a v ráně. U exsudujících ran krytí přispívá k udržení vlhkého prostředí rány.

Indikace

ALLEVYN Ag Non-Adhesive je absorpční antimikrobiální krytí pro ošetření sekundárně se hojících, chronických i akutních, granulujících a exsudujících ran, jako jsou například: dekubitální vředy, venózní vředy, diabetické vředy, popáleniny I., II. a III. stupně s různou hloubkou od povrchových po hluboké, místa po odběru kožních štěpů, rány s bujením/maligní rány a chirurgicky otevřené rány.

ALLEVYN Ag Non-Adhesive se může aplikovat u infikovaných ran. Při použití u infikovaných ran by rána měla být ošetřena podle příslušného léčebného protokolu platného v daném místě.

Kontraindikace

- Nepoužívejte u pacientů s přecitlivělostí na sulfadiazin stříbra nebo sulfonamidy.
- Je známo, že sulfonamidy způsobují jadrový ikterus. Proto by se ALLEVYN Ag Non-Adhesive neměl používat u žen, které jsou těhotné, prodělaly předčasný porod anebo kojí. Nepoužívejte ani u předčasně narozených a novorozenců během prvních měsíců života.

Bezpečnostní opatření

- K zevnímu použití.
- ALLEVYN Ag Non-Adhesive se nesmí používat současně s oxidujícími látkami (např. EUSOL) nebo peroxidem vodíku, protože ty mohou rozložit absorpční složku polyuretanu.
- ALLEVYN Ag Non-Adhesive může být nekompatibilní s topickými antimikrobiálními látkami.
- V případě klinické infekce nenahradí topická aplikace stříbra nezbytnou systémovou terapii ani jinou adekvátní léčbu infekce.
- Může dojít k zarudnutí okolní kůže. To může souviset s podrážděním citlivé kůže nebo s delším kontaktem exsudátu z rány s normální kůží. Při zarudnutí se musí léčba přerušit.
- Při elektronickém vyšetření, např. EEG nebo EKG, se vyhněte kontaktu s elektrodami nebo vodivými gely.
- Pokud je ALLEVYN Ag Non-Adhesive aplikován u pacientů během vyšetření MRT (terapie magnetickou rezonancí), může dojít k zahřátí.
- Nepoužívejte ALLEVYN Ag Non-Adhesive společně s produkty na bázi olejů, jako je např. petrolatum nebo vazelína.
- U ran s kavitami nepoužívejte ALLEVYN Ag Non-Adhesive samotný, lze ho však u těchto ran použít jako sekundární krytí.
- Stejně jako u všech produktů obsahujících sulfadiazin stříbra byste měli dodržovat níže uvedená bezpečnostní opatření, zvláště tehdy, když krytí kryje velké plochy.
- Pozor u pacientů se signifikantním omezením funkce jater nebo ledvin.
- Opatrně u pacientů s deficitem glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy.

- Účinky systémově podávaných léků se mohou měnit. To se může týkat zejména orálně podávaných hypoglykemik a fenytoinu. U těchto léků se doporučuje sledovat krevní hodnoty, protože jejich účinek může být zesílen.

Pokyny pro použití

- V případě potřeby je třeba ránu očistit podle léčebného protokolu platného v daném místě.
- Vyberte krytí, které je větší než rána.
- ALLEVYN Ag Non-Adhesive vyjměte z obalu aseptickým postupem.
- Bílou stranu přiložte na ránu a dbejte, aby byl kontakt s ránou dobrý. Potom zafixujte fóliovým krytím, odvinovací náplastí nebo obinadlem.
- U špatně přístupných míst ustříhnete krytí ve tvaru, který potřebujete.
- ALLEVYN Ag Non-Adhesive se hodí k použití pod kompresními obvazy. Ustříhnete krytí na velikost rány a pravidelně kontrolujte, zda se nepromáčí exsudátem. Pokud ano, krytí vyměňte.
- Krytí můžete nechat na ráně až 7 dní, když však provlhne, musí se vyměnit dříve.

Jak často měnit krytí

Na začátku léčby rány by se mělo krytí ALLEVYN Ag Non-Adhesive průběžně kontrolovat. Krytí můžete nechat na místě až 7 dní, ale je třeba jej měnit častěji, jakmile je vidět na krytí exsudát, který pronikl až do vzdálenosti 1,5 cm od okraje krytí. Také přitom je třeba postupovat podle léčebného protokolu platného v daném místě.

Odstranění krytí

K odstranění krytí ALLEVYN Ag Non-Adhesive sejmete obinadlo nebo fixační krytí a ALLEVYN Ag Non-Adhesive zdvihnete z rány.

Stupnice na obalu slouží jen pro orientaci při výběru fixace. Pozor, aby nedošlo ke křížové kontaminaci.

Balení

Kód	Rozměr	Počet ks v balení
66800082	5 cm x 5 cm	10 kusů
66800084	10 cm x 10 cm	10 kusů
66800087	15 cm x 15 cm	10 kusů
66800090	20 cm x 20 cm	10 kusů



Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN England.

Obchodní značka Smith & Nephew

©Smith & Nephew 07/2015



STERILE R

Sterilizace
gama
zářením



Nepoužívat,
pokud je obal
otevřený nebo
poškozený



Nepoužívejte
opakovaně



Dodržujte návod
k použití



Skladujte
v suchu
(<25°C)



Pozor
Čtěte
návod



Nevysta-
vujte
přímému
slunci