

ALLEVYN™ LIFE



Popis

ALLEVYN™ LIFE je adhezní náplast se silikonovým gelem, která zajišťuje optimální zvlhčení oblasti rány a podporuje hojení ran se středními až silnými výměšky. Absorpční vložka má pěnovou vrstvu a uzamykatelné jádro z materiálu s vynikající absorpcí. Na středu je pak diskretní vrstva, která skrývá výměšek. Silikonová adhezní vrstva je mírná i k citlivé pokožce a usnadňuje aplikaci, úpravu polohy a odstranění náplasti. Prodyšná vnější fólie pomáhá zabránit bakteriální kontaminaci a je odolná ve sprše.

Určeno pro použití

1. Ošetření ran se zaměřením na povrchová, granulující poranění, chronické a akutní rány s exudátem, hluboká a středně hluboká poranění včetně:


- Otlaků
- Vředů na nohou
- Diabetických vředů na chodidlech
- Operačních ran
- Popálenin prvního a druhého stupně
- Ošetření v místě operace zavedení implantátů
- Porušené pokožky
- Plísňových vředů

Lze použít ve spojení s INTRASITE™ GEL na nekrotické nebo olupující se rány.

2. Prevence otlačenin na nedotčené pokožce jako součást protokolu o prevenci otlačenin.

Více informací najdete na:

www.allevynlife.com & www.allevyn.com

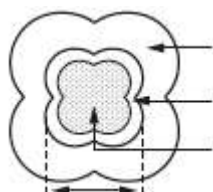

Adhezní okraj

Indikátor výměny

Diskretní vrstva

Absorpční vložka

Bezpečnostní opatření

- Absorpční vložku nestříhejte, protože vnitřní složky náplasti mohou ránu kontaminovat a zpozdit hojení.
- Náplast nenamáčejte do vody.
- Nepoužívejte spolu s oxidačními činidly, např. roztoky chlornanu (např. EUSOL) nebo peroxid vodíku, která mohou snížit absorpční vlastnosti náplasti.
- Pokud dojde k zarudnutí nebo zcitlivění pokožky, ukončete používání.

- Použití ALLEVYN™ LIFE jako součásti preventivní ošetření otlačenin nevyklučuje potřebu pokračovat v tvorbě a dodržování protokolu o prevenci proleženin (např. pravidelné polohování pacienta, vhodná matrace a péče o pokožku).
- Pouze pro jednorázové použití. Při použití u více pacientů může dojít ke křížové kontaminaci nebo infekci.
- Po otevření neuchovávejte nepoužité náplasti pro pozdější použití.
- Při použití na infikovaných poraněních je třeba infekci kontrolovat a ošetřovat podle místního klinického protokolu.

Návod k použití:

Očistěte místo aplikování. Ujistěte se, že je okolní pokožka čistá, suchá a zbavená nadměrného ochlupení.



1. Zvolte vhodnou velikost náplasti. Zajistěte, aby absorpční vložka pokrývala celou ránu. Stupnice na obalu je jen vodítkem.

2. Sejměte první krycí vrstvu a upevněte adhezní stranu náplasti na pokožce.

3. Sejměte zbývající krycí vrstvu/vrstvy. Narovnejte. Zajistěte, aby absorpční Vložka pokryla celou ránu. Náplast nerostahujte.


4. Vyrovnajte okraje. Ujistěte se, že zvrásnění nebrání utěsnění. Polohu náplasti lze upravit podle potřeby.

Sledování: Při použití jako prevence vzniku otlačů pokožku často kontrolujte zvednutím jednoho z rohů náplasti a následným umístěním zpět.

Odstranění: Nadzvedněte jeden roh a náplast pomalu stáhněte.

Četnost výměny

V počátečním stádiu ošetření náplast často kontrolujte. Náplast lze ponechat na svém místě až 7 dnů, u oblastí kříže max. 5 dnů. Náplast je třeba měnit podle stavu poranění a okolní pokožky, popř. když exudát pokrývá 75% indikátoru výměny. Výměnu zvažte při pokrytí více než 50% indikátoru výměny. Níže uvedené grafické znázornění slouží pouze jako vodítko a rozhodnutí o výměně závisí na klinickém vyhodnocení a místních postupech řízených odborným zdravotnickým pracovníkem:

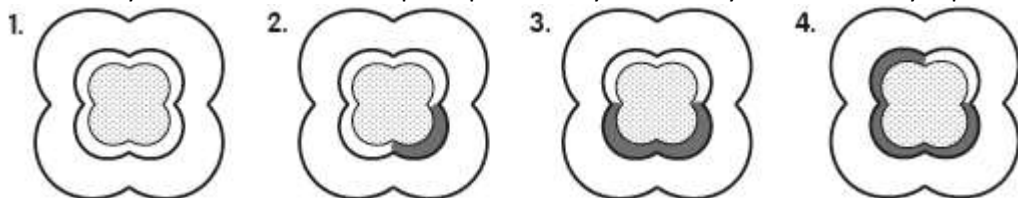

Výměna není nutná

Výměna není nutná

Zvažte výměnu

Proveďte výměnu

Dostupnost výrobku

Č.	Velikost
66801067	10,3cm x 10,3cm / 4" x 4"
66801068	12,9cm x 12,9cm / 5 ¹ / ₁₆ " x 5 ¹ / ₁₆ "
66801069	15,4cm x 15,4cm / 6 ¹ / ₁₆ " x 6 ¹ / ₁₆ "
66801070	21cm x 21cm / 8 ³ / ₄ " x 8 ³ / ₄ "

Dostupnost

Krabice po 10
Krabice po 10
Krabice po 10
Krabice po 10

Rovněž součást sortimentu ALLEVYN LIFE:

Č.	Velikost	Dostupnost
66801304	Náplast na rány 25cm x 25,2cm / 9,8" x 9,9"	Krabice po 5
66801306	Náplast křížové kosti 17,2cm x 17,5cm / 6 ³ / ₄ " x 6 ⁷ / ₈ "	Krabice po 10
66801307	Náplast křížové kosti 21,6cm x 23cm / 8 ¹ / ₂ " x 9"	Krabice po 10

Smith & Nephew Medical Limited,
101 Hessle Road, Hull HU3 2BN England. ™Obchodní značky Smith & Nephew
©Smith & Nephew Datum vydání 04/2016

CE

0086



Sterilizováno etylenoxidem



Nepoužívejte-je-li obal otevřený nebo poškozený

18700636

10601312

68517



Nepoužívejte opakovaně



Prostudujte si návod k použití



Skladujte v suchu (méně než 25°C/77°F)



Pozor



Udržujte z dosahu přímého slunce