

schülke -+



Tekutý dezinfekční přípravek na bázi kombinovaného účinku alkoholů a KAS, vhodný k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů

**Rychlý
účinek**

desprej® new

Naše Plus

- Okamžitě k použití
- Zaručuje rychlý dezinfekční efekt
- Vhodný k dezinfekci špatně dostupných míst
- Dobrá materiálová snášenlivost
- Kompatibilní s utěrkami wettask a schülke wipes

Oblast použití

desprej® new je vhodný k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů ve zdravotnických zařízeních, kosmetických, pedikérských a tatoo salonech, fitness a wellness centrech (stoly, stolky, vozíky, kliky, dveře, pomůcky apod.). Obzvláště vhodné pro oblasti se zvýšeným infekčním rizikem. Přípravek je vhodný všude tam, kde je potřeba rychle a zároveň účinně dezinfikovat, jako např.:

- Povrchy v blízkosti pacientů
- Kontaktní plochy
- Vyšetřovny
- Operační stoly a okolní povrchy
- Jídelní stoly a pracovní plochy

Účinnost

Baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní

Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití

desprej® new se neředí a aplikuje se koncentrovaný pomocí postříku, případně otěru. Dbejte na rovnoměrné nanesení přípravku (rozetřít utěrkou) a nechte jej působit po dobu expozice, přebytečné množství tekutiny otřete po uplynutí

doby expozice jednorázovou utěrkou. Nevhodný na materiály citlivé na alkohol (plexisklo, akryláty, lesklé plasty).



Složení

100 g přípravku **desprej® new** obsahuje následující účinné látky:

- 45 g Ethanol
- 30 g Isopropanol
- 0,025 g Didecyldimethylammonium chloride

Zvláštní upozornění

Určeno pro profesionální trh. Nemíchejte s jinými produkty. Termoelektrické přístroje používejte až po úplném zaschnutí přípravku. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Nevdechujte aerosol. Povrchy které mají přijít do styku s potravinami je nutné po dezinfekci umýt čistou vodou. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Skladovat v uzavřených obalech, mimo zdrojů sálavého tepla, ohně, nápojů, krmiv, potravin a přímého slunečního záření. Teplota skladování: -10 až +25 °C. Přípravek není vhodný na povrchy, které narušuje alkohol (plexisklo, akryláty, lakované povrchy). Doba expirace: 36 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Desprej new 500 ml FL	20/Karton	70002032
Desprej new 5 l KA	1/Kanistr	70002033

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku



Související přípravky

- mikrozid® AF liquid

Životní prostředí

Společnost schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Typ přípravku

Biocidní přípravek



Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.