

CZ

Jednorázová obličejová MEDICAL rouška

(3-vrstvá s gumičkou)

Doporučuje se používat obličejovou roušku v případě:

- 1 pečujete-li nebo máte kontakt s pacienty nebo osobami s příznaky respiračních infekcí
- 2 jste-li návštěvníkem zdravotnických zařízení, např. nemocnice, ambulance atd.
- 3 navštěvujete-li přeplněná a špatně větraná místa
- 4 pracujete-li v prašném, znečištěném prostředí
- 5 pracujete-li v lékárně, zdravotnickém zařízení
- 6 v průběhu chřipkové sezóny
- 7 jste-li alergičtí na prach, pyl

Návod k použití



- 1 vyjměte roušku, otočte nosní sponu stranou nahoru a nasadte gumičky za uši
- 2 pomocí ukazováčku a prostředního prstu zatlačte nosní sponu, roztáhněte roušku dolů ke spodní čelisti
- 3 ujistěte se, aby rouška zakrývala nos, ústa až po spodní čelist

Upozornění:

- 1 jednorázovou obličejovou roušku, doporučujeme vyměnit každé 4 hodiny
- 2 používat se zvýšenou opatrností v případě kardiopulmonální dysfunkce
- 3 při likvidaci vložte použitou roušku do obalu

[Manufacturer] Hebei Aineng Biological Technology Co., Ltd
[Residence] Area 2, 17th floor, building 2, science and technology center, 136 huanghe avenue, high-tech zone, Shijiazhuang

Dovozce: MEDICAL PROTECT, s.r.o.
Hybešova 969/19a, 602 00 Brno
IČ: 016 39 331

[Číslo šarže] 1409202003
[Datum výroby] 09/14/20
[Datum expirace] 09/14/22

MADE IN CHINA



EN14683:2019

NON-STERILE

14,5*9,5cm

