

LEUKOSTRIP*

Elastické náplast'ové stehy.

Třída bezpečnosti: IIa

STERILNÍ K jednorázovému použití Sterilizováno gama zářením
Je-li sáček otevřen, či poškozen, přípravek nepoužívejte.
Skladujte v suchu (< 25°C)

Popis

Leukostrip se skládá ze 100% polyamidového elastického materiálu, pokrytého hypoalergenním lepidlem. Lepivá vrstva má vysokou počáteční i dlouhodobou lepicí sílu, takže Leukostrip fixuje okraje rány vždy bezpečně k sobě. Použití náplast'ových stehů má vynikající kosmetický efekt.

Působení

Náplast'ové stehy jsou pružné a mají dobrou tvarovou paměť,tzn., že v případě otoku rány se stehy roztáhnou a nedochází k namáhání okrajů rány. Po ústupu otoku se stehy opět stáhnou na svou původní velikost, takže sutura zůstává těsně a pevně uzavřena. Leukostrip je propustný pro plyny i vodní páry a minimalizuje riziko městnání sekretu v ráně nebo macerace kůže.

Indikace

Stehy Leukostrip jsou určeny pro primární uzavírání menších ran a k ochraně pevnosti sutury po odstranění stehů. Lze jej také použít k podpoře a ulehčení intradermálního, svorkového nebo jednobodového stehu a pro fixaci kožních transplantátů.

Aplikace

1. dezinfikujte a osušte ránu a její okolí
2. vyjměte krytí ze sterilního obalu, odstraňte ochranný papír a aplikujte na ránu lepidlovou stranou náplast'ového stehu
3. první náplast'ový steh aplikujte na střed incize, další dva na oba její konce.Další stehy lepte od konce rány ke středovému stehu

Odstranění

Náplast'ový steh odstraňte tak, že jej uchopíte pinzetou ve středu tzn., v oblasti sutury a tahem sundáte celý steh, tím zamezíte dráždění rány.

Upozornění pro uživatele

Není známa žádná alergická reakce.

Způsob balení

kód	velikost	balení	
66002876	4mm x 38mm	8 stripů ve folii	50ks
66002878	6,4mm x 76mm	3 stripy ve folii	50ks
66002879	6,4mm x 102mm	5 stripů ve folii	50ks
66002880	13mm x 102mm	6 stripů ve folii	50ks

Výrobce : Smith + Nephew Medical limited, Anglie

Distributor : Aura Medical s.r.o., Česká republika

© Smith + Nephew 2003